
Guide de migration

MyTerraillon - Wellness Coach

Cher Client, l'application MyTerraillon évolue et devient désormais Wellness Coach. Cette application vous est proposée gratuitement dans le cadre d'une mise à jour disponible dans l'App Store.

Vos données enregistrées dans l'application My Terraillon pourront être transférées en suivant les étapes (page 2) de ce guide de migration **lors de la première utilisation de l'application Wellness Coach.**

Nous restons à votre disposition pour toute question complémentaire.
Votre Service Clients : serviceconsommateurs@terraillon.fr


Retrouvez le guide complet de l'application en cliquant [ici](#)

MyTerraillon



1


Confirmation de l'adresse mail

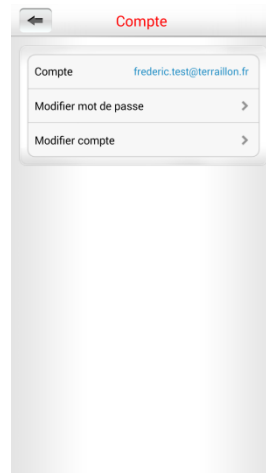

2


Télécharger
et lancer la
mise à jour

Page d'accueil Wellness Coach

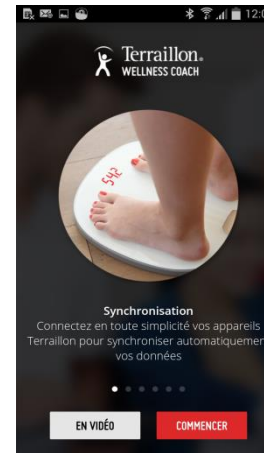


3

Connexion avec l'adresse mail MyTerraillon

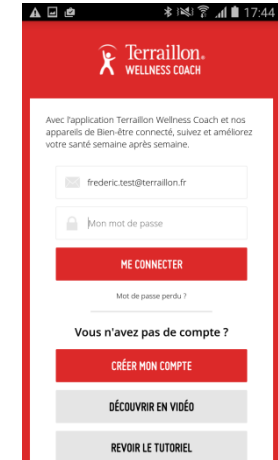

4

Migration du/des utilisateur(s)

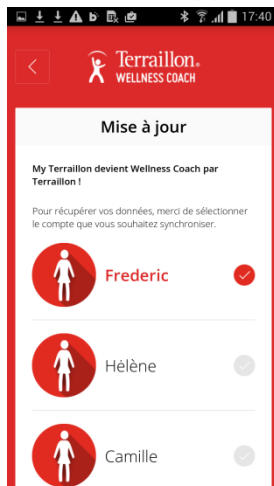


5

Si plusieurs utilisateurs sont enregistrés dans MyTerraillon, il est nécessaire d'effectuer maintenant la migration pour chacun des utilisateurs.

Suivre l'étape 6


6

Appuyez sur  pour accéder à la sélection des utilisateurs. Choisir l'utilisateur et appuyez sur « Mettre à jour mon profil » et insérer les données demandées.

Cette étape est à appliquer pour l'ensemble des utilisateurs.

7

Données disponibles dans Wellness Coach

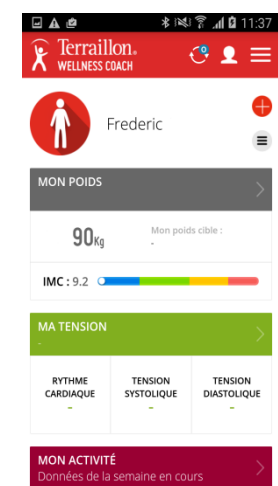

8